



Адрес: 141407, Московская область, г. Химки, Куркинское шоссе, строение 2, помещение 501, офис 5.1
Телефон.факс: (495) 380-22-78, (495) 380-22-87, (495) 380-32-55, 8-800- 555-84-00
E-mail: labromed@labromed.ru Internet:



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЛАБРОМЕД»

Шиленков В.М.

«16» марта 2026 г.

**НАБОР МЕБЕЛИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНОЙ «ЛАБРОМЕД-3» ПО
ТУ 9452-009-13305037-2008
Руководство по эксплуатации**

Редакция №1	Лист 1
Дата актуализации:	Всего листов 1 из 30

Введение

ООО «ЛАБРОМЕД» (далее – производитель, изготовитель) является разработчиком и производителем медицинского изделия «Набор мебели общебольничной «Лабромед-3» По ТУ 9452-009-13305037-2008» и обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении изделия и руководства по эксплуатации.

Меры предосторожности при применении

- ❖ Не использовать изделие не по назначению.
- ❖ К эксплуатации изделий допускаются лица, внимательно изучившие настоящее руководство по эксплуатации и конструкцию изделия.
- ❖ Перед началом применения необходимо ознакомиться с содержанием руководства по эксплуатации.
- ❖ Убедитесь, что изделия установлены на ровной и чистой поверхности: несоблюдение может привести к опрокидыванию или повреждению изделия, а также к травмам пользователей.
- ❖ Проверяйте все соединения и крепежи на наличие повреждений: игнорирование этого требования может вызвать поломку изделия и несчастные случаи.
- ❖ Не превышайте допустимые нагрузки, указанные производителем. Перегрузка может привести к деформации, поломке и выходу из строя изделия.
- ❖ Обращайтесь с ящиками аккуратно:
 - Не выдвигайте несколько ящиков одновременно.
 - Не допускайте резких рывков при выдвигании и задвигании ящиков.
 - Не используйте ящики в качестве подставки или ступени.
- ❖ Правильно дезинфицируйте: дезинфекцию проводите в соответствии с разделом «Дезинфекция, очистка и стерилизация».
- ❖ Не размещайте мебель рядом с источниками тепла или под прямыми солнечными лучами: это может привести к выгоранию, деформации или повреждению материалов изделия.
- ❖ Избегайте резких температурных перепадов: это может вызвать трещины и ухудшить прочность структурных элементов.
- ❖ Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется держать их закрытыми.
- ❖ Высокие предметы мебели рекомендуется больше нагружать в нижних секциях.
- ❖ При эксплуатации мебели с колёсами:
 - Перед использованием заблокируйте тормоза колёс для предотвращения самопроизвольного перемещения.
 - Перед перемещением убедитесь, что на поверхности нет препятствий, а колёса разблокированы.
 - Перемещайте изделие плавно, без резких рывков.
- ❖ Рекомендуется использование одноразовых покрывных материалов (простыней, пелёнок, чехлов), подлежащих замене после каждого пациента.

1. Назначение и область применения

1.1. Назначение изделия

Набор мебели общепольничной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-009-13305037-2008 (далее – набор, мебель, изделие) предназначенный для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, операционной, палате пациентов, клиничко-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью перемещения, размещения, хранения и/или обработки медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур.

Нестерильные изделия для многократного применения.

1.2. Функциональное назначение моделей

Наименование	Модель	Специфичное назначение
Кушетка медицинская смотровая	КМС.7120, КМС.7100.	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур: обще диагностического обследования, консервативного лечения, терапевтических процедур
Кушетка медицинская физиотерапевтическая	КДФ.7001	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур: физиотерапевтических процедур
Столик ассистентский (ассистер)	АС-3	Предназначен для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, операционной, клиничко-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью размещения и хранения медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур.
Стол пеленальный	СП-1	Предназначен для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, палате пациента и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур: для поддержания новорожденного, ребенка или взрослого пациента во время пеленания (смены подгузников).
Тележка передвижная с тормозами	ТП-2, ТП-3, ТП-2/1, ТП-3/1.	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, операционной, клиничко-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью перемещения и размещения медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов.
Тумба стационарная лабораторная	ТЛ-1, ТЛ-2, ТЛ-3, ТЛ-4.	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (клиничко-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью размещения, хранения и обработки медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом в процессе проведения медицинских процедур: забора образцов и/или проведения лабораторной диагностики

Наименование	Модель	Специфичное назначение
Тумба подкатная лабораторная	ТК 900-2, ТК 900-3, ТК 900-4	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (клинико-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью перемещения, размещения, хранения и обработки медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом в процессе проведения медицинских процедур: забора образцов и/или проведения лабораторной диагностики
Тумба лабораторная	ТКВ-1	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (клинико-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью размещения, хранения и обработки медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом в процессе проведения медицинских процедур: проведения лабораторной диагностики
Ширма медицинская	ШРМ-1 ШРМ-2 ШРМ-3 ШРТ-1 ШРТ-2 ШРД-1 ШРД-2	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, палате пациента и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур
Надставка лабораторная	НП 900-1 НП 1200-1 НП 900-2 НП 1200-2 НП 900-3 НП 1200-3 НП 1800-1 НП 2400-1 НП 1800-2 НП 2400-2 НП 1800-3 НП 2400-3 Н 900-1 Н 1200-1 Н 900-3 Н 1200-3 Н 1800-2 Н 2400-2 Н 900-2 Н 1200-2 Н 900-4 Н 1200-4 Н 1800-4 Н 2400-4	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (клинико-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью размещения и хранения медицинского инструмента, медицинских изделий, лекарственных препаратов (не требующих специальных условий хранения), различных медицинских материалов, использования медицинским персоналом в процессе проведения медицинских процедур: проведения лабораторной диагностики
Табурет вращающийся	ТМВ.5000 ТМВ.5010	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, операционной, палате пациентов, клинико-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур
Стул вращающийся	ТМВ.5005 ТМВ.5007	Предназначена для применения в больнице/ здравоохранительном учреждении в специальном медицинском помещении (процедурном и манипуляционном кабинете, кабинете врача, смотровом кабинете, операционной, палате пациентов, клинико-диагностической лаборатории и других подобных кабинетах медицинского профиля) с целью использования медицинским персоналом и пациентами в процессе проведения медицинских процедур

1.3. Область применения

Область применения:

Педиатрия, хирургия, лабораторная диагностика, гастроэнтерология, физиотерапия

Условия применения:

Мебель применяется в клиниках, больницах, поликлиниках, санаторно-курортных учреждениях и др.

1.4. Потенциальный пользователь

Медицинский персонал и пациенты.

Рекомендуется использование одноразовых покрывных материалов (простыней, пелёнок, чехлов), подлежащих замене после каждого пациента.

1.5. Показания к применению:

Наименование	Модель	Показания к применению
Кушетка медицинская смотровая	КМС.7120, КМС.7100	- Проведение медицинских осмотров, инъекций, заборов крови, перевязок, диагностических и лечебных процедур. - Размещение пациента в положении лёжа для кратковременного пребывания. - Использование в кабинетах врача, процедурных, перевязочных, педиатрических, физиотерапевтических, функциональной диагностики, ЛФК, эндоскопических, ожоговых отделениях, палатах. - Обеспечение удобства и безопасности пациента во время стандартных медицинских манипуляций. - Возможность санитарной обработки поверхности.
Кушетка медицинская физиотерапевтическая	КДФ.7001	- Проведения медицинских процедур: физиотерапевтических процедур. - Размещение пациента в положении лёжа для кратковременного пребывания. - Обеспечение удобства и безопасности пациента во время стандартных медицинских манипуляций. - Возможность санитарной обработки поверхности.
Столик ассистентский (ассистер)	АС-3	- Использование в лабораторных, диагностических, функциональных, стоматологических и специализированных кабинетах. - Размещение и сортировка инструментов и материалов в нескольких ящиках. - Перемещение между рабочими зонами благодаря колёсам с тормозами. - Лёгкая санитарная обработка.
Стол пеленальный	СП-1	- Проведение осмотров, ухода и медицинских процедур с младенцами и детьми раннего возраста. - Проведение пеленания, переодевания, гигиенических и профилактических мероприятий. - Обеспечение безопасного и удобного размещения ребёнка благодаря бортикам и мягкой обивке. - поддержания новорожденного, ребенка во время пеленания (смены подгузников), - Использование в педиатрических и детских медицинских кабинетах, а также в кабинетах для вакцинации и профилактики.
Тележка передвижная с тормозами	ТП-2, ТП-3, ТП-2/1, ТП-3/1	- Использование в процедурных, перевязочных, операционных, лабораторных, диагностических, стоматологических и специализированных кабинетах. - Размещение и сортировка большого количества медицинских инструментов и расходных материалов на открытых полках (стеклянных и/или металлических). - Быстрый доступ к необходимым принадлежностям во время процедур. - Перемещение между рабочими зонами благодаря колёсам с тормозами. - Лёгкая санитарная обработка.
Тумба стационарная лабораторная	ТЛ-1, ТЛ-2, ТЛ-3, ТЛ-4	- Хранение и организация медицинских инструментов, медикаментов, перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты. - Обеспечение систематизированного, безопасного и быстрого доступа к медицинским материалам и инструментам. - Разделение хранения по зонам (отдельные секции, полки, ящики) для повышения эргономики и санитарии. - Возможность хранения как стерильных, так и нестерильных медицинских материалов. - Использование в специализированных медицинских помещениях.

Наименование	Модель	Показания к применению
Тумба подкатная лабораторная	ТК 900-2, ТК 900-3, ТК 900-4	- Хранение и организация медицинских инструментов, медикаментов, перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты. - Обеспечение систематизированного, безопасного и быстрого доступа к медицинским материалам и инструментам. - Разделение хранения по зонам (отдельные секции, полки, ящики) для повышения эргономики и санитарии. - Возможность хранения как стерильных, так и нестерильных медицинских материалов. - Использование в специализированных медицинских помещениях. - Соответствие санитарным требованиям, возможность санитарной обработки. - Перемещение между рабочими зонами благодаря колёсам с тормозами.
Тумба лабораторная	ТКВ-1	- Хранение и организация медицинских инструментов, медикаментов, перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты. - Обеспечение систематизированного, безопасного и быстрого доступа к медицинским материалам и инструментам. - Возможность хранения как стерильных, так и нестерильных медицинских материалов. - Использование в специализированных медицинских помещениях. - Соответствие санитарным требованиям, возможность санитарной обработки.
Ширма медицинская	ШРМ-1 ШРМ-2 ШРМ-3 ШРТ-1 ШРТ-2 ШРД-1 ШРД-2	- Обеспечение приватности пациента при проведении медицинских осмотров, процедур, манипуляций. - Временное зонирование пространства в медицинских кабинетах, палатах, перевязочных, процедурных, диагностических, лабораторных и других специализированных помещениях. - Создание индивидуальных зон для пациентов, в том числе при одновременном нахождении нескольких человек в помещении. - Легкость санитарной обработки (поликарбонат — гладкая, устойчивая к дезинфекции поверхность; ткань ПВХ — влагостойкая, легко моется). - Мобильность (модели на колесах) и возможность быстрой перестановки. - Применяются для повышения комфорта и соблюдения этики при медицинских манипуляциях.
Надставка лабораторная	НП 900-1 НП 1200-1 НП 900-2 НП 1200-2 НП 900-3 НП 1200-3 НП 1800-1 НП 2400-1 НП 1800-2 НП 2400-2 НП 1800-3 НП 2400-3 Н 900-1 Н 1200-1 Н 900-3 Н 1200-3 Н 1800-2 Н 2400-2 Н 900-2 Н 1200-2 Н 900-4 Н 1200-4 Н 1800-4 Н 2400-4	- Хранение и организация расходных материалов, инструментов и медикаментов. - Экономия пространства за счет размещения на столе. - Быстрый доступ к материалам во время процедур, повышение эффективности работы. - Использование в медицинских кабинетах, лабораториях, перевязочных, процедурных, стерилизационных, стоматологических и других специализированных помещениях. - Легкость дезинфекции и санитарной обработки, возможность использования в помещениях с повышенными санитарными требованиями.

Наименование	Модель	Показания к применению
Табурет вращающийся	TMB.5000 TMB.5010	- Использование в медицинских, лабораторных, диагностических, стоматологических, процедурных, функциональных, физиотерапевтических, ЛФК и других кабинетах для врача, ассистента или персонала. - Обеспечение эргономики и комфорта при длительной работе сидя за счёт регулировки высоты сиденья, поддержки спины, иногда подножки. - Возможность индивидуальной настройки высоты сиденья для оптимального положения пользователя. - Мобильность и удобство перемещения по рабочей зоне благодаря пятилучевой базе с колёсами. - Лёгкая санитарная обработка благодаря материалам исполнения
Стул вращающийся	TMB.5005 TMB.5007	- Использование в медицинских, лабораторных, диагностических, стоматологических, процедурных, функциональных, физиотерапевтических, ЛФК и других кабинетах для врача, ассистента или персонала. - Обеспечение эргономики и комфорта при длительной работе сидя за счёт регулировки высоты сиденья, поддержки спины, иногда подножки. - Возможность индивидуальной настройки высоты сиденья для оптимального положения пользователя. - Мобильность и удобство перемещения по рабочей зоне благодаря пятилучевой базе с колёсами. - Лёгкая санитарная обработка благодаря материалам исполнения

1.6. Противопоказания:

❖ Индивидуальная непереносимость материалов.

1.7. Побочное действие:

❖ Не выявлены.

1.8. Классификация медицинского изделия

Класс риска : 1

Стерильность : Не стерильное и не стерилизуемое

2. Технические характеристики

2.1. Описание изделий

Описание, основные параметры и габаритные размеры изделий указаны в документе «Паспорт изделия» для каждой модели.

Средний срок службы изделий до списания не менее 8 лет. За критерий предельного состояния изделий принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

2.2. Технические характеристики

❖ Кушетка медицинская

Параметр	КМС.7120	КМС.7100	КДФ.7001
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	сталь	алюминий	дерево
– покрытие	Порошковая окраска	Анодировка	Лак / эмаль
– обивка	Винилискожа / Пенополиуретан формованный	Винилискожа / Пенополиуретан формованный	Винилискожа / Пенополиуретан формованный
– цвет обивки	По таблице RAL*	По таблице RAL*	По таблице RAL*
Габаритные параметры			
– изделие, Д×Ш×В, см	180 – 220 × 55 – 70 × 55 – 80	180 – 220 × 55 – 70 × 55 – 80	180 – 220 × 55 – 70 × 55 – 80
– шаг изменения размеров, мм	10		
– сечение каркаса, см	2 – 7 × 2 – 7	2 – 7 × 2 – 7	2 – 7 × 4 – 13
– лежак/сиденье, Д×Ш×Т, см	120 – 180 × 55 – 70 × 3 – 6	120 – 180 × 55 – 70 × 3 – 6	120 – 180 × 55 – 70 × 3 – 6
– подголовник, Д×Ш, см	10 – 100 × 55 – 70 × 3 – 6	10 – 100 × 55 – 70 × 3 – 6	10 – 100 × 55 – 70 × 3 – 6
– упаковка, Д×Ш×В, см	170 – 230 × 60 – 80 × 10 – 90	170 – 230 × 60 – 80 × 10 – 90	170 – 230 × 60 – 80 × 10 – 90
Масса, кг			
– изделие	17 – 63	15 – 61	18 – 76
– брутто, не более	78	75	90
Устанавливается на:			
– опоры	нерегулируемы заглушки подпятники В = 4 мм, ø 30 мм	регулируемые опоры В = 31 мм ø 25 мм	–
Регулировка			
– подголовник, °	Минимальный угол наклона - 0. Максимальный угол наклона - 20-50	Минимальный угол наклона - 0. Максимальный угол наклона - 20-50	Минимальный угол наклона - 0. Максимальный угол наклона - 20-50
– Диапазон регулировки опор, мм	–	10 – 20	–
Максимальная нагрузка, кг			
– изделие	140	140	140

❖ Столик ассистентский

Параметр	АС-3
Внешний вид	
Материалы	
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль
– корпус	ЛДСП / ДБСП
– верхний и нижний горизонт	ДБСП / ЛДСП
– фасад	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием
– основание	Металл
– ручка	Металл / Пластик / Пластик+Металл
Габаритные параметры	
– изделие, Д×Ш×В, см	40 – 60 × 40 – 60 × 75 – 90
– шаг изменения размеров, мм	10
– толщина каркаса, мм	1-5
– столешница, Д×Ш, см	40 – 60 × 40 – 60
– ящик, Д×Ш×В, см	20 – 60 × 20 – 60 × 5 – 30
– упаковка, Д×Ш×В, см	45 – 70 × 45 – 70 × 80 – 100
Масса, кг	
– изделия	25 – 54
– брутто, не более	67
Устанавливается на:	
– колеса ø, мм	50 – 100
Максимальная нагрузка, кг	
– столешница	20
– дно ящика	20
Усилия, Н (кгс)	
– выдвигания ящика	не более 30
– для перемещения мебели с номинальной нагрузкой по гладкому ровному полу	не более 150

❖ **Стол медицинский пеленальный**

Параметр	СП-1
Внешний вид	
Материалы	
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль
– корпус	ЛДСП / ДБСП
– столешница и бортики	ДБСП / ЛДСП
– обивка	Винилискожа / Пенополиуретан формованный
– цвет	По таблице RAL*
Габаритные параметры	
– изделия, Д×Ш×В, см	60 – 120 × 40 – 100 × 75 – 130
– шаг изменения размеров, мм	10
– столешница, Д×Ш×В, см	60 – 120 × 40 – 100 × 0,5 - 3,2
– бортик боковой, Д×Ш×В, см	40 – 100 × 0,5 - 3,2 × 7 - 40
– бортик задний, Д×Ш×В, см	55 – 120 × 0,5-3,2 × 7 – 40
– полка, Д×Ш×В, см	60 – 120 × 40 – 100 × 0,5 - 2,6
– бортик полки, В, см	0-5
– упаковка, Д×Ш×В, см	60 – 130 × 40 – 110 × 75 – 140
Масса, кг	
– изделие	21 – 87
– брутто, не более	110
Устанавливается на:	
– опоры, В, мм	20 – 150
Максимальная нагрузка, кг	
– изделие	20
– полка	20

❖ **Тележка передвижная с тормозами**

Параметр	ТП-2	ТП-3	ТП-2/1	ТП-3/1
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Нержавеющая сталь / Стальная труба	Нержавеющая сталь / Стальная труба	Нержавеющая сталь / Стальная труба	Нержавеющая сталь / Стальная труба
– столешница	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь
– полка	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь	Нержавеющая сталь / Сталь
– цвет	Глянцевая нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь / По RAL	Глянцевая нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь / По RAL	Глянцевая нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь / По RAL	Глянцевая нержавеющая сталь / Шлифованная нержавеющая сталь / По RAL
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5	1-5	1-5	1-5
– сечение каркаса, см	1 – 5 × 1 – 5	1 – 5 × 1 – 5	1 – 5 × 1 – 5	1 – 5 × 1 – 5
– столешница, Д×Ш×Т, см	–	–	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5
– полка, Д×Ш×Т, см	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5	40 – 80 × 30 – 80 × 0,1 – 0,5
– ящик, Д×Ш×В, см	–	–	20 – 80 × 5 – 80 × 3 - 40	20 – 80 × 5 – 80 × 3 - 40
– упаковка, Д×Ш×В, см	40 – 90 × 30 – 90 × 40 - 130	40 – 90 × 30 – 90 × 40 - 130	40 – 90 × 30 – 90 × 40 - 130	40 – 90 × 30 – 90 × 40 - 130
Масса, кг				
– изделия	4 – 51	5 – 64	6 – 67	6 – 72
– брутто, не более	63	78	78	86
Устанавливается на				
– колеса, Ø, мм	25-100	25-100	25-100	25-100
Максимальная нагрузка, кг				
– каркас	20	20	20	20
– полка	20	20	20	20
– ящик	20	20	20	20
Усилия, Н (кгс)				
– для перемещения мебели с номинальной нагрузкой по гладкому ровному полу	не более 150	не более 150	не более 150	не более 150
– выдвигания ящика	–	–	не более 30	не более 30

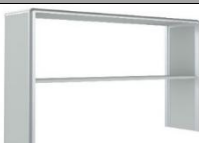
❖ **Тумба лабораторная**

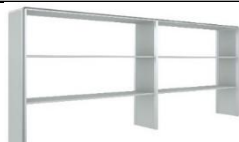
Параметр	ТЛ-1	ТЛ-2	ТЛ-3	ТЛ-4
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– столешница	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП
– фасад	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
– ручка	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	30 – 90 × 30 – 80 × 60 – 90	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120	40 – 80 × 30 – 80 × 40 – 120
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5			
– столешница, Д×Ш×Т, см	30 – 90 × 30 – 80 × 0,5-3,2	30 – 90 × 30 – 80 × 0,5-3,2	30 – 90 × 30 – 80 × 0,5-3,2	30 – 90 × 30 – 80 × 0,5-3,2
– полка, Д×Ш×Т, см	20 – 88 × 20 – 78 × 0,5-2,6	20 – 88 × 20 – 78 × 0,5-2,6	-	-
– ящик, Д×Ш×В, см	-	15 – 80 × 10 – 80 × 3 - 50	15 – 80 × 10 – 80 × 3 - 50	15 – 80 × 10 – 80 × 3 - 50
– упаковка, Д×Ш×В, см	30 – 100 × 30 – 90 × 60 – 100	30 – 100 × 30 – 90 × 60 – 100	30 – 100 × 30 – 90 × 60 – 100	30 – 100 × 30 – 90 × 60 – 100
Масса, кг				
– изделия	12 – 43	13 – 49	14 – 56	16 – 67
– брутто, не более	55	61	71	84
Устанавливается на:				
– опоры, В, мм	20 – 150	20 – 150	20 – 150	20 – 150
Максимальная нагрузка, кг				
– столешница	20	20	20	20
– ящик	20	20	20	20
– полка	20	20	20	20
Усилия, Н (кгс)				
– выдвигания ящика	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30

Параметр	ТК 900-2	ТК 900-3	ТК 900-4	ТКВ-1
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– столешница	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП	ДБСП / ЛДСП
– фасад	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием	ЛДСП / ДБСП / МДФ / в виде рамочного профиля (алюминиевого, пластикового) с установкой заполнения из ДБСП / МДФ с пластиковым покрытием
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
– ручка	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл	Металл / Пластик / Пластик+Металл
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	90 × 50 × 70	90 × 50 × 70	90 × 50 × 70	90 × 50 × 70
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5			
– столешница, Д×Ш×Т, см	90×50×0,5-3,2	90×50×0,5-3,2	90×50×0,5-3,2	90×50×0,5-3,2
– полка, Д×Ш×Т, см	80-90×40-50×0,5-2,6	-	-	-
– ящик, Д×Ш×В, см	20 – 90 × 10 – 50 × 3 - 40	20 – 90 × 10 – 50 × 3 - 40	20 – 90 × 10 – 50 × 3 - 40	-
– поддон, Д×Ш×В, см	-	-	-	80-90×30-50×6-20
– упаковка, Д×Ш×В, см	100 × 55 × 80	100 × 55 × 80	100 × 55 × 80	100 × 55 × 80
Масса, кг				
– изделия	46	53	56	38
– брутто, не более	56	64	66	50
Устанавливается на:				
– колеса, Ø, мм	50-100	50-100	50-100	50-100
– опоры, В, мм	-	-	-	20-150
Максимальная нагрузка, кг				
– столешница	20	20	20	20
– ящик	20	20	20	20
– полка	20	20	20	20
Усилия, Н (кгс)				
– выдвигания ящика	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30
– выдвигания поддона	-	-	-	не более 150
– для перемещения мебели с номинальной нагрузкой по гладкому ровному полу	не более 150	не более 150	не более 150	не более 150

❖ **Надставка лабораторная**

Параметр	НП 900-1	НП 900-2	НП 900-3
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры			
– изделие, Д×Ш×В, см	60 – 100 × 10 – 50 × 10 – 60	60 – 100 × 10 – 50 × 30 – 120	60 – 100 × 10 – 50 × 40 – 150
– шаг изменения размеров, мм	10		
– толщина каркаса, мм	1-5		
– упаковка, Д×Ш×В, см	60 – 110 × 10 – 60 × 10 – 70	60 – 110 × 10 – 60 × 30 – 130	60 – 110 × 10 – 60 × 40 – 160
Масса, кг			
– изделия	3 – 21	5 – 33	8 – 51
– брутто, не более	27	47	64
Максимальная нагрузка, кг			
– полка	20	20	20

Параметр	НП 1200-1	НП 1200-2	НП 1200-3
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры			
– изделие, Д×Ш×В, см	100 – 150 × 10 – 50 × 10 – 60	100 – 150 × 10 – 50 × 30 – 120	100 – 150 × 10 – 50 × 40 – 150
– шаг изменения размеров, мм	10		
– толщина каркаса, мм	1-5		
– упаковка, Д×Ш×В, см	100 – 160 × 10 – 60 × 10 – 70	100 – 160 × 10 – 60 × 30 – 130	100 – 160 × 10 – 60 × 40 – 160
Масса, кг			
– изделия	6 – 36	9 – 52	13 – 71
– брутто, не более	47	67	87
Максимальная нагрузка, кг			
– полка	20	20	20

Параметр	НП 1800-1	НП 1800-2	НП 1800-3
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры			
– изделие, Д×Ш×В, см	150 – 200 × 10 – 50 × 10 – 60	150 – 200 × 10 – 50 × 30 – 120	150 – 200 × 10 – 50 × 40 – 150
– шаг изменения размеров, мм	10		
– толщина каркаса, мм	1-5		
– упаковка, Д×Ш×В, см	150 – 210 × 10 – 60 × 10 – 70	150 – 210 × 10 – 60 × 30 – 130	150 – 210 × 10 – 60 × 40 – 160
Масса, кг			
– изделия	9 – 53	13 – 66	16 – 81
– брутто, не более	65	78	94
Максимальная нагрузка, кг			
– полка	20	20	20

Параметр	НП 2400-1	НП 2400-2	НП 2400-3
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры			
– изделие, Д×Ш×В, см	200 – 250 × 10 – 50 × 10 – 60	200 – 250 × 10 – 50 × 30 – 120	200 – 250 × 10 – 50 × 40 – 150
– шаг изменения размеров, мм	10		
– толщина каркаса, мм	1-5		
– упаковка, Д×Ш×В, см	200 – 260 × 10 – 60 × 10 – 70	200 – 260 × 10 – 60 × 30 – 130	200 – 260 × 10 – 60 × 40 – 160
Масса, кг			
– изделия	12 – 71	16 – 83	19 – 104
– брутто, не более	85	95	119
Максимальная нагрузка, кг			

Параметр	НП 2400-1	НП 2400-2	НП 2400-3
– полка	20	20	20

Параметр	Н 900-1	Н 900-2	Н 900-3	Н 900-4
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	85×40×80	85×40×80	85×40×117	85×40×115
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5			
– упаковка, Д×Ш×В, см	95×50×90	95×50×90	95×50×127	95×50×125
Масса, кг				
– изделия	12	15	25	24
– брутто, не более	24	27	38	40
Максимальная нагрузка, кг				
– полка	20	20	20	20

Параметр	Н 1200-1	Н 1200-2	Н 1200-3	Н 1200-4
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	115×40×80	115×400×800	115×40×115	115×40×115
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5			
– упаковка, Д×Ш×В, см	125×50×90	125×50×90	125×50×125	125×50×125
Масса, кг				
– изделия	14	19	26	30
– брутто, не более	26	31	39	45
Максимальная нагрузка, кг				
– полка	20	20	20	20

Параметр	Н 1800-2	Н 1800-4	Н 2400-2	Н 2400-4
Внешний вид				
Материалы				
– каркас	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль	Анодированный алюминиевый профиль
– полка	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП	ДБСП / пластик с установкой профиля по длинной стороне детали / ЛДСП
Габаритные параметры				
– изделие, Д×Ш×В, см	162,5×40×80	162,5×40×115	222,5×40×80	222,5×40×117
– шаг изменения размеров, мм	10			
– толщина каркаса, мм	1-5			
– упаковка, Д×Ш×В, см	175×50×90	175×50×125	235×50×90	235×50×127
Масса, кг				
– изделия	23	38	29	67
– брутто, не более	36	51	47	79
Максимальная нагрузка, кг				
– полка	20	20	20	20

❖ Табурет вращающийся и стул вращающийся

Параметр	TMB.5000	TMB.5005	TMB.5007	TMB.5010
Внешний вид				
Материалы				
– Пятилучевая база	Сталь / Алюминий	Сталь / Алюминий	Сталь / Алюминий	Сталь / Алюминий
– Газлифт	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
– Сиденье	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой
– Спинка	-	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой	поролон + винилискожа или пенополиуретан формовой	-
– Опора для ног	-	Сталь / Алюминий	-	Сталь / Алюминий
– Цвет	По таблице RAL*	По таблице RAL*	По таблице RAL*	По таблице RAL*
Габаритные параметры, см				
– изделие, Вмакс×Г×Ш	50 – 75 × 40 – 71 × 40 – 71	110 – 140 × 40 – 71 × 40 – 71	80 – 120 × 40 – 71 × 40 – 71	75 – 95 × 40 – 71 × 40 – 71
– шаг изменения размеров, мм	10			
– спинка, В×Ш	-	28×39	28×39	-
– сиденье	30 – 50 × 30 – 50 или Ø30 – 50	30 – 50 × 30 – 50	30 – 50 × 30 – 50	30 – 50 × 30 – 50 или Ø30 – 50
– база, Ø	40 – 71	40 – 71	40 – 71	40 – 71
– подножка для ног, Ø	-	30 – 45	-	30 – 45
– упаковка, Д×Ш×В	60–90×60–90×40 – 110	60–90×60–90×40 – 110	60–90×60–90×40 – 110	60–90×60–90×40 – 110
– колеса, Ø	5	5	5	5
Масса, кг				
– изделия	4 – 15	6 – 20	5 – 20	5 – 20
– брутто, не более	25	30	30	30
Регулировка				
– высота сиденья в нижнем положении, см	30 – 70	50 – 90	30 – 70	50 – 90
– высота сиденья в верхнем положении, см	50 – 75	75 – 95	50 – 75	75 – 95
Максимальная нагрузка, кг				
– изделия	100	100	100	100
– спинка	-	15	15	-
– подножка для ног	-	20	-	20
Усилия, Н (кгс)				
– для перемещения мебели с номинальной нагрузкой по гладкому ровному полу	не более 150	не более 150	не более 150	не более 150

❖ Ширма медицинская

Параметр	ШРМ-1	ШРМ-2	ШРМ-3
Внешний вид			
Материалы			
– каркас	Алюминиевый профиль	Алюминиевый профиль	Алюминиевый профиль
– покрытие	Анодировка	Анодировка	Анодировка
– заполнение секций	Полиамидные ткани, стойкие к дезинфицирующим составам	Полиамидные ткани, стойкие к дезинфицирующим составам	Полиамидные ткани, стойкие к дезинфицирующим составам
Габаритные параметры, см			
– изделия, Д×Г×В	50 – 100 × 15 – 50 × 120 – 200	100 – 200 × 15 – 50 × 120 – 200	150 – 300 × 15 – 50 × 120 – 200
– шаг изменения размеров, мм	10		
– сечение каркаса	2 – 5 × 2 – 5	2 – 5 × 2 – 5	2 – 5 × 2 – 5
– секция, Д×В	50 – 100 × 120 – 200	50 – 100 × 120 – 200	50 – 100 × 120 – 200
– упаковка, Д×Ш×В	60 – 110 × 6 – 90 × 130 – 210	60 – 170 × 6 – 90 × 130 – 210	60 – 110 × 6 – 90 × 130 – 210
Масса, кг			
– изделия	4 – 15	5 – 30	12 – 45
– брутто, не более	20	35	50
Устанавливается на:			
– опорная балка, см, Д×В×Ш	2 шт.: 49 × 2,5 × 2,5	2 шт.: 49 × 2,5 × 2,5	2 шт.: 49 × 2,5 × 2,5
– опоры регулируемые, см, В×Ш,	4 шт.: 3 × 2,5	4 шт.: 3 × 2,5	3 × 2,5
– колеса, Ø×Т, см	-	1 шт.: 5×2	2 шт.: 5×2
Усилия, Н (кгс)			
– для перемещения мебели с номинальной нагрузкой по гладкому ровному полу	-	не более 150	не более 150
– для складывания и раскладывания секций ширм	-	не более 5	не более 5

3. Комплектация

Набор мебели общебольничной "ЛАБРОМЕД-3" по ТУ 9452-009-13305037-2008

1. Кушетка медицинская смотровая, в моделях – от 1 до 2 шт.:

Модели:

1.1. Кушетка медицинская смотровая КМС.7120, в составе:

- Кушетка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

1.2. Кушетка медицинская смотровая КМС.7100, в составе:

- Кушетка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

2. Кушетка медицинская физиотерапевтическая КДФ.7001 (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- Кушетка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

3. Столик ассистентский (ассистер) АС-3 (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- Столик в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

4. Стол пеленальный СП-1 (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- Стол в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

5. Тележка передвижная с тормозами, в моделях (при необходимости) – от 1 до 2 шт.:

Модели:

5.1. Тележка передвижная с тормозами ТП-2, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

5.2. Тележка передвижная с тормозами ТП-3, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

5.3. Тележка передвижная с тормозами ТП-2/1, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

5.4. Тележка передвижная с тормозами ТП-3/1, в составе:

- Тележка в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

6. Тумба стационарная лабораторная, в моделях (при необходимости) – от 1 до 4 шт.:

Модели:

6.1. Тумба стационарная лабораторная ТЛ-1, в составе:

- Тумба в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

6.2. Тумба стационарная лабораторная ТЛ-2, в составе:

- Тумба в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

6.3. Тумба стационарная лабораторная ТЛ-3, в составе:

- Тумба в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

6.4. Тумба стационарная лабораторная ТЛ-4, в составе:

- Тумба в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

7. Тумба подкатная лабораторная, в моделях (при необходимости) – от 1 до 3 шт.:

Модели:

7.1. Тумба подкатная лабораторная ТК 900-2, в составе:

- Тумба в собранном виде – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.

Редакция №1	Лист 14
Дата актуализации	Всего листов 14 из 30

- 7.2. Тумба подкатная лабораторная ТК 900-3, в составе:
- Тумба в собранном виде – 1 шт.
 - Паспорт – 1 экз.
- 7.3. Тумба подкатная лабораторная ТК 900-4, в составе:
- Тумба в собранном виде – 1 шт.
 - Паспорт – 1 экз.
8. Тумба лабораторная ТКВ-1 (при необходимости) – 1 шт., в составе:
- Тумба в собранном виде – 1 шт.,
 - Выкатной поддон – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
9. Ширма медицинская, в моделях – от 1 до 7 шт.:
- Модели:
- 9.1. Ширма медицинская односекционная ШРМ-1, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.2. Ширма медицинская двухсекционная ШРМ-2, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.3. Ширма медицинская трехсекционная ШРМ-3, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.4. Ширма медицинская односекционная ШРТ-1, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.5. Ширма медицинская двухсекционная ШРТ-2, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.6. Ширма медицинская односекционная ШРД-1, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 9.7. Ширма медицинская двухсекционная ШРД-2, в составе:
- Ширма в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
10. Надставка лабораторная, в моделях (при необходимости) – от 1 до 24 шт.:
- Модели:
- 10.1. Надставка лабораторная НП 900-1, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.2. Надставка лабораторная НП 1200-1, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.3. Надставка лабораторная НП 900-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.4. Надставка лабораторная НП 1200-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.5. Надставка лабораторная НП 900-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.6. Надставка лабораторная НП 1200-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.7. Надставка лабораторная НП 1800-1, в составе:

Редакция №1	Лист 15
Дата актуализации	Всего листов 15 из 30

- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.8. Надставка лабораторная НП 2400-1, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.9. Надставка лабораторная НП 1800-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.10. Надставка лабораторная НП 2400-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.11. Надставка лабораторная НП 1800-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.12. Надставка лабораторная НП 2400-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.13. Надставка лабораторная Н 900-1, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.14. Надставка лабораторная Н 1200-1, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.15. Надставка лабораторная Н 900-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.16. Надставка лабораторная Н 1200-3, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.17. Надставка лабораторная Н 1800-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.18. Надставка лабораторная Н 2400-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.19. Надставка лабораторная Н 900-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.20. Надставка лабораторная Н 1200-2, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.21. Надставка лабораторная Н 900-4, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.22. Надставка лабораторная Н 1200-4, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.23. Надставка лабораторная Н 1800-4, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
- 10.24. Надставка лабораторная Н 2400-4, в составе:
- Надставка в собранном виде – 1 шт.,
 - Паспорт – 1 экз.
11. Табурет вращающийся, в моделях (при необходимости) – от 1 до 2 шт.:
- Модели:

Редакция №1	Лист 16
Дата актуализации	Всего листов 16 из 30

11.1. Табурет вращающийся ТМВ.5000, в составе:

- колеса – 5 шт.,
- крестовина – 1 шт.,
- газлифт – 1 шт.,
- механизм крепления – 1 шт.
- сиденье – 1 шт.,
- винт М6х35 – 6 шт.
- Паспорт – 1 экз.

11.2. Табурет вращающийся ТМВ.5010, в составе:

- колеса – 5 шт.,
- крестовина – 1 шт.,
- опора для ног – 1 шт.
- газлифт – 1 шт.,
- механизм крепления – 1 шт.
- сиденье – 1 шт.,
- винт М6х35 – 6 шт.,
- Паспорт – 1 экз.

12. Стул вращающийся, в моделях (при необходимости) – от 1 до 2 шт.:

Модели:

12.1. Стул вращающийся ТМВ.5005, в составе:

- колеса – 5 шт.,
- крестовина – 1 шт.,
- опора для ног – 1 шт.
- газлифт – 1 шт.,
- сиденье – 1 шт.,
- держатель спинки – 1 шт.,
- спинка – 1 шт.,
- винт М6х35 – 6 шт.,
- Паспорт – 1 экз.

12.2. Стул вращающийся ТМВ.5007, в составе:

- колеса – 5 шт.,
- крестовина – 1 шт.,
- газлифт – 1 шт.,
- сиденье – 1 шт.,
- держатель спинки – 1 шт.,
- спинка – 1 шт.,
- винт М6х35 – 6 шт.,
- Паспорт – 1 экз.

13. Руководство по эксплуатации по QR-коду или по запросу на бумажном носителе – 1 шт.

Примечание:

- 1) количество изделий по согласованию с заказчиком.
- 2) комплектность изделий должна соответствовать комплектности, приведённой в эксплуатационной документации (паспорте) и документации предприятия-изготовителя.

4. Правила эксплуатации и требования по технике безопасности

4.1. Подготовка к установке

Перед началом установки убедитесь, что помещение, в которое будет помещена мебель, соответствует следующим требованиям:

- Температура и влажность соответствуют стандартам для медицинских учреждений.
- Помещение чистое и свободно от посторонних предметов.

4.2. Установка мебели

4.2.1. Мебель в собранном виде

Если мебель поставляется в собранном виде, следует выполнить следующие действия:

1) Проверьте комплектацию:

Убедитесь, что все элементы, указанные в накладной, присутствуют и не повреждены.

2) Переместите мебель на нужное место в помещении. Необходимо учитывать следующие факторы:

- Доступность для медицинского персонала.
- Удобство для пациентов.
- Соответствие требованиям по безопасности.

4.2.2. Мебель в разобранном виде

Для мебели, поставляемой в разобранном виде, необходимо следовать Инструкции по сборке (п.15).

1) Проверьте комплектацию:

Убедитесь, что все детали и крепежные элементы на месте.

2) Сборка мебели:

- Ознакомьтесь с предоставленной инструкцией по сборке.
- Поэтапно собирайте мебель, следуя указаниям.
- Убедитесь, что все элементы прочно закреплены, и нет люфтов.

4.3. Завершение установки

1) Проверка функциональности:

Убедитесь, что все механизмы работают корректно и нет посторонних шумов.

2) Очищение:

Подготовьте мебель к эксплуатации, очистив её от пыли и грязи с помощью рекомендованных средств.

3) Инструкция по эксплуатации:

Предоставьте персоналу инструкции по эксплуатации мебели, включая правила ухода и обслуживания.

4.4. Поддержка

Если у вас возникли вопросы или потребовалась поддержка, свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации или консультаций.

Изделия поставляются в собранном или разобранном виде.

4.5. Порядок работы с изделием

1) Подготовка изделия к использованию

- Убедитесь, что изделие установлено на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Проверьте целостность всех элементов и креплений.
- При необходимости отрегулируйте высоту (для табуретов, стульев) или угол наклона подголовника (для кушеток).
- Убедитесь, что колёса (при наличии) заблокированы тормозами.
- Для ширм: разблокируйте колёса, раздвиньте секции и зафиксируйте их в рабочем положении. Убедитесь в устойчивости конструкции. При необходимости отрегулируйте высоту опор.

2) Подготовка пациента

- При использовании кушетки, стола пеленального— разместите одноразовый покрывной материал (простыню, пелёнку) на поверхности, контактирующей с пациентом.
- Помогите пациенту занять необходимое положение (лёжа, сидя) в зависимости от проводимой процедуры.

3) Применение

- При использовании кушетки отрегулируйте подголовник, разместите пациента на лежаке в положении лёжа и используйте поверхность для проведения осмотра или процедуры.

Редакция №1	Лист 18
Дата актуализации	Всего листов 18 из 30

- При использовании ассистера разместите медицинский инструмент и материалы на столешнице и в ящиках, при необходимости перемещайте столик на колёсах к рабочей зоне.
- При использовании стола пеленального разместите ребёнка на столешнице между бортиками, используйте для пеленания, осмотра или гигиенических процедур.
- При использовании тележки разместите инструменты и материалы на полках, заблокируйте тормоза при работе и разблокируйте для перемещения между кабинетами.
- При использовании тумбы используйте столешницу для работы, полки и ящики для хранения и сортировки инструментов и расходных материалов.
- При использовании ширмы раздвиньте секции (при наличии), установите ширму вокруг пациента или рабочей зоны, для моделей на колёсах заблокируйте тормоза после установки.
- При использовании надставки установите на столешницу, разместите расходные материалы и инструменты на полках для вертикального хранения и быстрого доступа.
- При использовании табурета отрегулируйте высоту сиденья газлифтом, используйте для работы сидя, перемещайтесь на колёсах по рабочей зоне.
- При использовании стула отрегулируйте высоту сиденья и спинки газлифтом, используйте для работы сидя с поддержкой спины, перемещайтесь на колёсах по рабочей зоне.

4) Совместимые изделия

Допускается совместное применение набора мебели со следующими изделиями:

- Медицинские покрывала и простыни одноразовые;
- Медицинские изделия, оборудование (диагностическое, физиотерапевтическое, ультразвуковое, функциональной диагностики, лабораторное);
- Светильники медицинские передвижные и потолочные;
- Штативы медицинские для инфузионных систем;
- Ёмкости для дезинфекции и стерилизации;

Требования к совместимым изделиям:

- Все совместимые медицинские изделия должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным органом в установленном порядке.
- Совместимые изделия не должны создавать нагрузку, превышающую допустимые значения;
- Изделия, размещаемые на столешницах, полках и в ящиках, не должны превышать габаритные размеры соответствующих элементов мебели;
- Электрические изделия (светильники, стойки с электропитанием) должны размещаться с учётом требований электробезопасности, исключая контакт с влажными поверхностями и дезинфицирующими средствами.

5) Завершение работы

После использования удалите одноразовые покрывные материалы. Проведите очистку и дезинфекцию поверхностей в соответствии с разделом «Дезинфекция, очистка и стерилизация». Закройте ящики и дверцы. При необходимости зафиксируйте колёса тормозами.

4.6. Требования по технике безопасности

- ❖ Для долговечной работы:
 - не рекомендуется подвергать поверхности изделий ударам и значительному локальному нагреву;
 - рекомендуется содержать в чистоте все поверхности изделий.
- ❖ Рабочие поверхности, выполненные из декоративного бумажно-слоистого пластика (ДБСП), устойчивы к агрессивным средам, таким, как: серная, азотная, хлорная, уксусная кислоты, температурам до 90 °С. В случае попадания высококонцентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 3 минут) на поверхности нежелательно.
- ❖ Рабочие поверхности из влагостойкого ДСП, покрытые ламинатом высокого давления, ударопрочны, влагостойки, имеют очень хорошую стойкость к водопоглощению, воздействию высоких температур, химических веществ. В случае попадания концентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 3 минут) на поверхности нежелательно.

Редакция №1	Лист 19
Дата актуализации	Всего листов 19 из 30

- ❖ Рабочие поверхности из МДФ, умеренно ударопрочны, влагостойки, умеренно устойчивы к воздействию высоких температур (до 80 °С), химических веществ. В случае попадания концентрированных агрессивных сред на рабочую поверхность следует убрать их с поверхности, длительное нахождение (свыше 1 минуты) на поверхности не допускается.
- ❖ Рабочие поверхности из ДСП не следует подвергать прямому воздействию влаги, химических веществ, высоких температур.
- ❖ Мебель нельзя устанавливать близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла (к радиаторам отопления и другим отопительным приборам), а также располагать мебельный комплект в непосредственной близости к системам кондиционирования, вентиляции и увлажнения воздуха.
- ❖ Длительное попадание и воздействие жидкостей на торцы поверхностей изделий, выполненных из всех видов МДФ и ДСП, не допускается. В случае попадания жидкости на торцы поверхностей изделий, выполненных из всех видов МДФ и ДСП, рекомендуется сразу насухо протереть места попадания жидкости.
- ❖ При длительном воздействии прямых солнечных лучей на фасады, дверцы и прочие элементы изделия, выполненные из ламинированной ДСП, декоративного бумажно-слоистого пластика ДБСП, МДФ с покрытием, с применением кромки ПВХ, поэтому старайтесь не допускать этого. В случае замены и/или добавления предметов мебели в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое становится менее заметным с течением времени, является совершенно естественным.
- ❖ Берегите мебель от механических повреждений. Во избежание царапин и трещин старайтесь не допускать падения острых и тяжелых предметов на поверхность мебели.
- ❖ Нагрузка на ящики и полки:

При эксплуатации мебели все тяжелые предметы следует размещать внутри таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей площади, а также обеспечить необходимое равновесие скользящих частей выдвижных ящиков.

а) вещи на полках рекомендуется размещать по следующему принципу: более тяжелые – ближе к краям (опора), более легкие – ближе к центру.

б) высокие предметы мебели рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости.

- ❖ Во избежание перекосов дверей и ящиков предметов мебели, их рекомендуется держать закрытыми.

4.7. Эксплуатация и уход за столешницами.

- ❖ регулярно протирайте рабочие поверхности без применения царапающих и шлифующих средств.
- ❖ нельзя использовать для очистки поверхностей абразивные, кислотосодержащие, порошковые средства.
- ❖ жидкость на стыковочных швах должна быть незамедлительно удалена.
- ❖ чистка лёгких загрязнений осуществляется с помощью бумажного полотенца, мягкой ткани, губки и т.п.
- ❖ чистящие средства, содержащие воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налёт, поэтому их использование противопоказано.
- ❖ после влажной очистки рабочих поверхностей не забудьте вытереть их насухо.

4.8. Уход за фурнитурой:

- ❖ после определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, колеса, механизмы выдвижения и т.п.) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебели. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки рабочих механизмов. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

Редакция №1	Лист 20
Дата актуализации	Всего листов 20 из 30

- ❖ Если отдельно стоящее изделие располагается в нише (изделие ограничено по периметру, например, стенами, полом и потолком помещения), то между граничащими элементами и изделием может образоваться технологический зазор не менее 16 мм на каждую сторону, если иное не оговорено условиями договора.
- ❖ Если в помещении установлен натяжной потолок, то минимальный зазор между верхним элементом изделия и потолком составляет 10 см.

5. Правила транспортирования, хранения

Параметр	Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура, °С	от + 10 до + 35	от + 5 до + 40	от – 50 до + 50
Относительная влажность, %	до 80 при + 25 °С	от 45 до 75	до 80 при + 25 °С

Изделия транспортируют всеми видами крытого транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур, перед распаковкой изделия необходимо выдержать в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Воздух помещения при хранении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Перечень и описание материалов

Материалы, контактирующих с организмом человека:

Вид и длительность контакта: кратковременный контакт с неповрежденной кожей.

- Кожа искусственная, марки Skaden B 353, цветов: 1004, 1017, 1044, 1089, 1118, 1123, 1210, 1548, 1549, 3022, 3036, 3096, 3104, 5061, 5118, 5141, 5153, 5154, 5161, 5182, 6001, 6021, 6098, 6099, 6100, 6127, 6156, 6279, 7000, 7257, 8414, 9001, 9011, производства Sanwil Polska sp z o.o. (Польша) – обивка изделий;
- Кожа искусственная, марки Oregon, цветов: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 33, 36, производства HANGZHOU ZHONGFANG TEXTILE IMP/EXP.CO.LTD. (Китай) – обивка изделий;
- Ткань для обивки мебели, марки DOMUS, цветов: antracite, atlantic, berry, black, cacao, chocolate, coral, cream brulee, ecru, green, kiwi, lavender, lime, lollipop, mauve, milk, naturel, navy, nectarine, nut, plombieres, sienna, smoky, taupe, white, производства ANHUI ANLI ARTIFICIAL LEATHER CO., LTD (Китай) – обивка изделий;
- Кожа искусственная и ткани для обивки мебели, марки SANTORINI, цвет: 0401, 0402, 0404, 0405, 0406, 0407, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0419, 0420, 0421, 0422, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0432, производства DONGGUAN QIANDING LEATHER CO., LTD (Китай) – обивка изделий.

Медицинский персонал должен работать в перчатках при проведении процедур с использованием изделия.

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

7. Дезинфекция, очистка и стерилизация

7.1. Очистка

Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

7.2. Дезинфекция

Поверхности мебели должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113 3%-ым раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1%-ым раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

7.3. Стерилизация

Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции.

Нестерильные, стерилизации не подлежат.

8. Утилизация

Изделия по окончании срока службы и при потере потребительских свойств должны утилизироваться их непосредственным правообладателем с учетом требований СанПиН 2.1.3684 и прочими действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий и материалов, из которых они изготовлены.

9. Техническое обслуживание и ремонт

9.1. Ввод в эксплуатацию мебели по месту применения включает в себя работы по её распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию.

9.2. Ввод в эксплуатацию мебели производится в соответствии с условиями договора (контракта) поставки силами собственных служб технического обслуживания изготовителя или силами уполномоченных служб технического обслуживания, а также в соответствии с указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации.

9.3. Периодичность технического обслуживания медицинской мебели не устанавливается. Основой для принятия решения о необходимости принятия решения и объеме работ по техническому обслуживанию и ремонту служат результаты контроля пользователем технического состояния изделия.

9.4. Техническое состояние изделия в процессе эксплуатации определяется визуально и проверкой в действии (функциональный контроль).

9.5. В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений крепежных элементов, особенно подвижных, поэтому необходимо периодически (по мере надобности) подтягивать винты в петлях, в монтажных планках и других элементах крепежа.

9.6. Изготовитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт дефектов поставленной мебели, возникших по вине изготовителя, силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

9.7. Изготовитель обеспечивает в послегарантийный период на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленной мебели силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

9.8. Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как на месте эксплуатации изделия, так и на производственных площадях службы технического обслуживания мебели в зависимости от сложности, объема работ и возможности транспортировки изделия.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ 9452-009-13305037-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи.

10.3. Гарантийный срок хранения изделий – 6 месяцев.

10.4. Гарантийный срок эксплуатации тележек – 3 года со дня продажи.

10.5. Гарантийный срок хранения тележек — 3 года со дня изготовления.

11. Информация о наличии в медицинском изделии лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

Изделие не содержит лекарственного средства для медицинского применения, материалов животного и (или) человеческого происхождения

12. Сведения о рекламации

При появлении неисправностей, влияющих на работу «Набор мебели общебольничной «ЛАБРОМЕД-3» по ТУ 9452-009-13305037-2008» в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Производитель (разработчик):

Наименование	: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБРОМЕД» (ООО «ЛАБРОМЕД»)
Юридический адрес	: 141407, Московская область, город Химки, Куркинское шоссе, строение 2, помещение 501, офис № 5.1
Тел/факс	: +7 (495) 380-22-87/+7 (495) 380-22-78
E-mail	: labromed@labromed.ru
Сайт	: www.labromed.ru

Места производства:

Площадка №	: 1
Наименование	: ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес	: Россия, 141623, Московская область, Клинский р-н, дер. Ногово, д. 52, стр. 2
Площадка №	: 2
Наименование	: ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес	: Россия, 141623, Московская область, Клинский р-н, дер. Ногово, д. 52, стр. 3
Площадка №	: 3
Наименование	: ООО «ЛАБРОМЕД»
Фактический адрес	: г. Москва, г. Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, дом 14, строение 2

1. $\frac{1}{2}$ 2. $\frac{1}{2}$ 3. $\frac{1}{2}$ 4. $\frac{1}{2}$ 5. $\frac{1}{2}$ 6. $\frac{1}{2}$ 7. $\frac{1}{2}$ 8. $\frac{1}{2}$ 9. $\frac{1}{2}$ 10. $\frac{1}{2}$

(1 9)

1 2 3 4

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

14.Перечень нормативной документации:

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия

ГОСТ 25644-96 Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования

ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования

ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования

МУ-287-113 Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения

ТУ 6-01-4689387-16-89 Хлорамин Б технический

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

15. Инструкция по сборке

➤ Табурет вращающийся TMB.5000, TMB.5010



- ❖ в отверстия диаметром 11 мм в крестовине (2) вставить колеса (1)
- ❖ газлифт (4) вставить в отверстие диаметром 50 мм в крестовине (2)
- ❖ опору для ног (3) надеть на газлифт (4) и зафиксировать по высоте регулировочным винтом*
- ❖ механизм крепления (5) прикрепить четырьмя винтами М6х35 к сиденью (6)
- ❖ сиденье (6) надеть плотно на верхний стержень газлифта (4)

(*) выполняется для модели TMB.5010



- ❖ в отверстия диаметром 11 мм в крестовине (2) вставить колеса (1)
- ❖ газлифт (4) вставить в отверстие диаметром 50 мм в крестовине (2)
- ❖ опору для ног (3) надеть на газлифт (4) и зафиксировать по высоте регулировочным винтом*
- ❖ держатель спинки (6) прикрепить четырьмя винтами М6х35 к сиденью (5)
- ❖ сиденье (5) надеть плотно на верхний стержень газлифта (3)
- ❖ прикрепить двумя винтами М6х35 спинку сиденья (7) к держателю спинки (6)

(*) выполняется для модели ТМВ.5005

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью и подписью 30
(Трицать) листа(ов)



В.М. Шиленьков